




SEMIMASCHERA FILTRANTE RIUTILIZZABILE MAF-P

DESTINATA ALLA COLLETTIVITA' AD USO PRECAUZIONALE GENERICO

NON CONFIGURABILE COME D.M. DESTINATO AGLI OPERATORI SANITARI

NON CONFIGURABILE COME D.P.I. DESTINATO AI LAVORATORI

*(conforme alle indicazioni della circolare del Ministero della Salute -
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico
numero 3572 del 18/03/2020)*

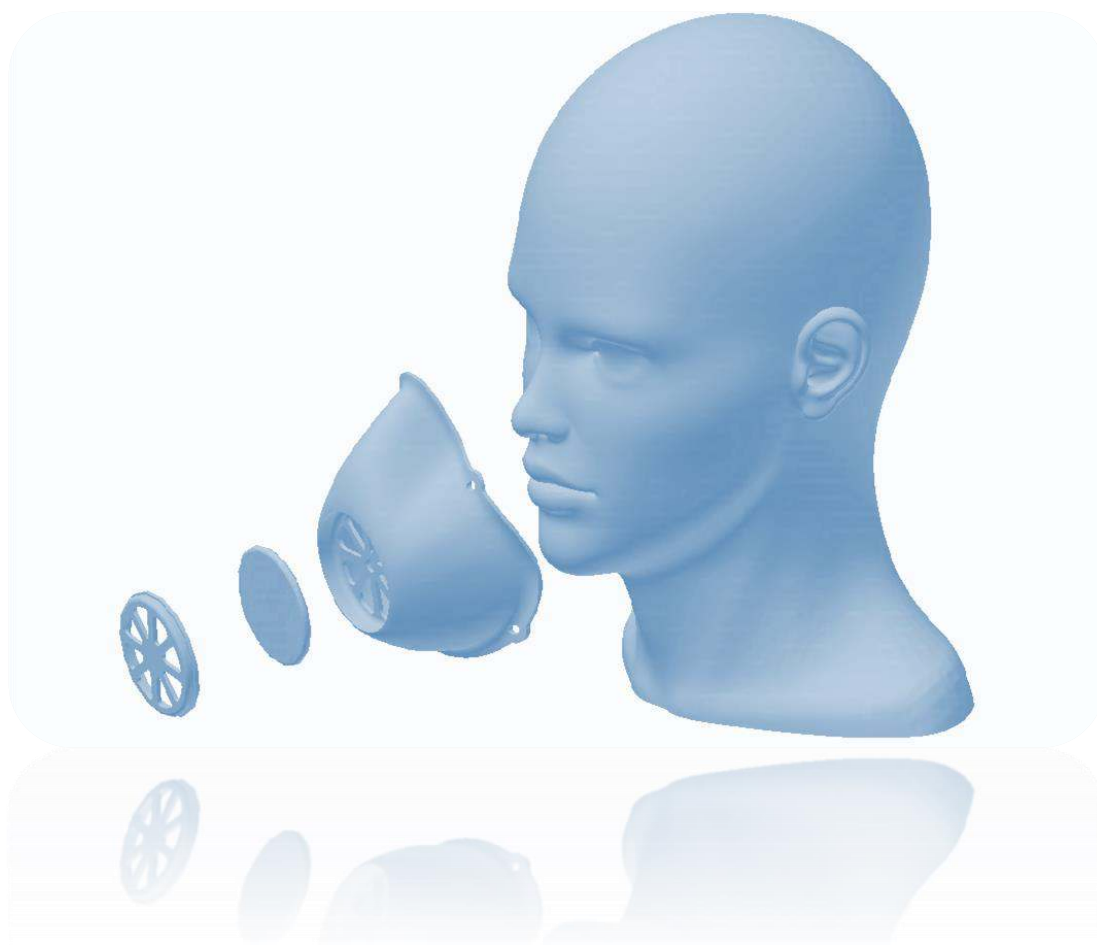

Scheda Tecnica

1. Codice del prodotto:

MAF-P

2. Descrizione:

Semimaschera Filtrante dotata di filtro sostituibile

3. Colore:

Trasparente

4. Materiale:

- ✓ Semimaschera in PVC
- ✓ Materiale Filtrante in Cotone Idrofilo
- ✓ Cordini di fissaggio diametro 4 mm, 100% Spandex Rivestito in PA Latex Free
- ✓ Passacordino in PA66
- ✓ Nasello in Alluminio

5. Controlli preliminari all'uso:



Verificare l'assenza di rotture della Semimaschera o dei cordini elastici.

Verificare che il Filtro sia correttamente alloggiato nella sua sede.

Trattandosi di un prodotto non sterile, l'igiene della Semimaschera deve essere curata dall'utilizzatore.

6. Uso

Indossare la Semimaschera in modo da coprire il mento, il naso e la bocca, fissandola dietro alle orecchie o dietro al collo e alla nuca, mediante i cordini elastici forniti. I lembi della semimaschera devono risultare adesi al volto.

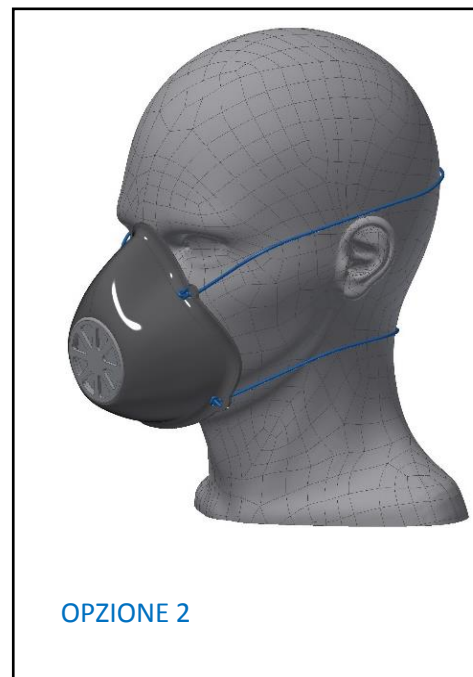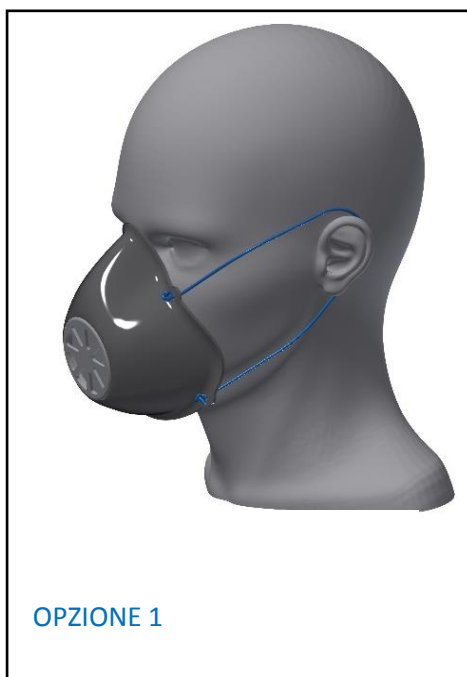




7. Manutenzione

La semimaschera è lavabile mediante acqua e sapone neutro.

Sanificazione: Alcool denaturato, Amuchina o prodotti simili

Sostituzione del Filtro:

- 1) estrarre il portafiltro
- 2) posizionare uniformemente il filtro sul portafiltro senza lasciare spazi vuoti
- 3) inserire il portafiltro nella Semimaschera fino a completo posizionamento nella gola

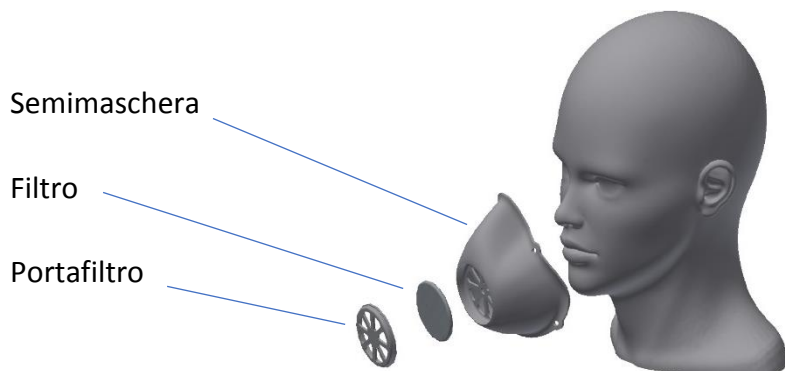

8. Note

Articolo non adatto ai minori di anni 12 e a soggetti che presentano lesioni cutanee.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per uso improprio, diverso dall'uso precauzionale generico destinato alla collettività.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui il prodotto dovesse essere venduto o utilizzato all'estero.

E' comunque richiesto il rispetto delle disposizioni in tema di distanziamento sociale e delle altre regole precauzionali introdotte in ragione dell'emergenza Covid-19.

9. Confezionamento

Le Semimaschere sono confezionate singolarmente in buste trasparenti di polietilene, unitamente al foglietto informativo, ai cordini elastici e al nasello di ricambio.

10. Smaltimento

Nel contenitore dei rifiuti non differenziati, salvo diverse indicazioni delle norme locali in merito ai rifiuti urbani.

Prodotto e distribuito da I.C.P. Srl, S.P. 16 - Km 15,150 Castelnuovo Don Bosco 14022 (AT)

Email: info@icp.it Tel 0119927503 P.IVA 00611190059